

HEALING CURRENT PROBE

ヒーリングカレント導子



icing × microcurrent

アイシングとマイクロカレントの同時アプローチが
筋肉や関節のトリートメント、クールダウンに効果を発揮

アイシング

icing

氷などを用いて気になる部位を冷却し、熱を冷まします。アイシングは、スポーツの現場などでよく使われ、筋肉、関節のトリートメントや競技後のクールダウンに有効です。

マイクロカレント

microcurrent

マイクロカレントは、ほとんど刺激を感じない微弱な電流です。もともと人体に存在している電流に似た、極めて弱い電流を流すことで、日頃のコンディショニングケアやトレーニング後のトリートメントに効果的です。




筋肉や関節の
トリートメントに

競技後の
クールダウンに

日常の
コンディショニング
ケアに




※粘着パッドは付属されていません。

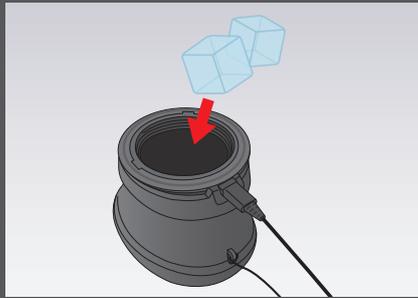

①ヒーリングカレント導子のヘッド部を取り外し、本体に氷を入れます。



②接続コードをヒーリングカレント導子のリング型電極ケーブルと粘着パッドに差し込み、使用する製品と接続します。

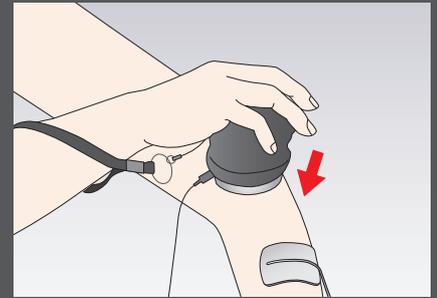

③ケアを行う部位から少し離れたところに粘着パッドを貼り、ヒーリングカレント導子のヘッド部を肌に当てた状態で出力を開始します。

※ヘッド部を肌に当てないと出力が開始されません。
※ストラップは付属されていません。



メーカー希望小売価格
27,500円(税抜25,000円)

[標準付属品]
リング型電極ケーブル
6,600円(税抜6,000円)

特許出願中

[本体仕様]

サイズ	(W)71×(D)89×(H)88(mm) ※リング型電極ケーブル含まず
重量	約300g ※内容物含まず

※ヒーリングカレント導子のみでは使用できません。

ヒーリングカレント導子の接続可能製品



AT-mini Personal I

AT-mini Personal II



[ツインビートR]
Twin Beat

※「ケアコース」のみで使用可能です。



ITO Sports Project

物理療法機器メーカーのパイオニアとして、アスリートの活躍を応援しています。

イトスポーツプロジェクト 検索

<https://ito-sports-project.com/>



公式Instagram

製品やサービスを使用したスポーツサポート活動について発信しています。



多くのスポーツ団体をサポートしています。

- アクセルトラッククラブ
- 茨城ロボッツ
- 宇都宮ブリッツェン
- NECレッドロケッツ
- F・マリノススポーツクラブ
- 鹿島アントラーズ
- シーホース三河
- 信州ブレイブウォリアーズ
- 新体操 日本代表チーム
- 公益財団法人 全日本空手道連盟
- 公益財団法人 全日本柔道連盟
- 公益財団法人 全日本スキー連盟
- 千葉ジェッツ
- 名古屋グランパス
- 新潟アルビレックスランニングクラブ
- 公益財団法人 日本アイスホッケー連盟
- 公益社団法人 日本エイトリフティング協会
- 一般社団法人 日本車いすテニス協会
- 一般社団法人 日本競輪選手会
- 一般社団法人 日本ゴールボール協会
- 公益財団法人 日本自転車競技連盟
- 公益財団法人 日本セーリング連盟
- 一般社団法人 日本デフバレーボール協会
- 一般社団法人 日本トップリーグ連携機構
- 公益社団法人 日本トライアスロン連合
- 一般社団法人 日本バイアスロン連盟
- 公益財団法人 日本バドミントン協会
- 一般社団法人 日本パラバドミントン連盟
- 一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟
- 公益財団法人 日本ハンドボール協会
- 公益社団法人 日本フェンシング協会
- 公益社団法人 日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟
- 公益社団法人 日本ラクロス協会
- 公益財団法人 日本陸上競技連盟
- 公益社団法人 日本ローイング協会
- バレーボール 女子日本代表チーム
- 横浜ビー・コルセアーズ
- リガール仙台
- レバンガ北海道

(50音順)

発売元

伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8
TEL. 048-254-1019(お客様センター)
<https://www.itolator.co.jp/>



お問い合わせ先