



取扱説明書
保証書付

目次

はじめに

安全上のご注意	4
使用上のご注意	5
保守・点検のご注意	11

はじめてお使いになる前に

本体と付属品・仕様	13
各部名称	14
ご使用前に	15

使用方法

RUCOE GOLFの使い方	19
----------------	----

困ったときは

Q&A	23
消耗品の交換・ご注文について	25
保証書	26

安全上のご注意

- 取扱説明書は本器を安全にお使いいただくために必要です。本器を人に貸したり、差し上げる時には点検を受けた上で、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡してください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」とP.5～P.12の注意事項をよく読み、正しくお使いください。
- あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記のような絵表示をしています。危害や損害の程度を表していますので、内容を理解してから本文をお読みください。



取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。



取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性または物的損害が想定される内容を示します。

表示例



は、本器の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するための絵表示です。

※表示例は「感電注意」です。



は、本器の取扱いにおいて、その行為を禁止する絵表示です。

※表示例は「分解禁止」です。



は、本器の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する絵表示です。

※表示例は「プラグをコンセントから抜く」です。

この取扱説明書のイラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

使用上のご注意



下記のような医用電気機器との併用は、機器に誤作動をまねく恐れがありますので使用しないでください。

- ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器
- 人工心肺等の生命維持用医用電気機器
- 心電計等の装着型医用電気機器



次のような人及び部位は必ず医師とご相談の上、使用してください。





- 脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性(疼痛性)疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 重度な血行障害のある部位
- 血友病などの出血性素因の高い人
- 静脈怒張の皮膚表面
- 萎縮性拘縮を起こしている皮膚表面
- 病名などがはっきりしない人
- 安静を必要とする人
- 血管障害の恐れのある血圧異常の人
- 妊産婦(産前産後を含む)
- 生理時の腹部
- 熱の高い人(38℃以上)
- 伝染性疾患の人
- アトピー性皮膚炎の人
- 日焼けなどで皮膚に炎症を起こしている部位
- 皮膚が化膿し、炎症を起こしている部位
- アレルギー体質で、特にお肌が敏感な人
- かゆみやほてりのあるシミや病的なシミのある人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている人
- てんかん症状のある人
- 多発性硬化症の人
- 体内に金属やプラスチックの入っている部位
- 適用部位の皮膚に損傷・炎症、その他の異常のある人
- 適用部位に知覚障害のある人
- 過去に筋腫の手術または治療を受けたことがある部位
- 紫斑病など内出血しやすい人
- 骨粗鬆症など簡単に骨折する人
- 医師から運動を禁じられている人
- 狭心症の人
- 医師から心臓に注意などの指示がある人

使用上のご注意




1) 使用場所や状況について

 **危険** 浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。

 **警告** 感電、火傷や発火などの事故や物的損害、または故障の原因となります。

-  ①台所、車の中、火気の近く、直射日光の当たる場所など、温度の高い場所やほこりの多い場所で使用したり、保管しないでください。本器の寿命を縮めたり、暑さによる変形など故障の原因となります。
-  ②本体を寒い場所から温かい場所に移動した直後に使用しないでください。本体内部で結露現象が生じる恐れがあります。この状態で使用すると表示部の誤動作や故障の原因となります。使用するときは移動後2時間以上経過してから電源を入れてください。
-  ③トイレでの使用は、落下や水没などの恐れが生じ、事故や故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
-  ④保護者、医師、または専門家の監督下以外では子供に使用させないでください。また、子供が機器本体及び付属品で遊んだりしないようにしてください。

2) 準備について **危険**

-  ①他の機器との併用は、危険をまねく恐れがあるので、行わないでください。
-  ②濡れた手での操作は、感電する可能性があり非常に危険です。絶対におやめください。
-  ③乳幼児には使用させないでください。

**警告**

使用を開始するにあたり、禁忌事項及び以下のことに注意してください。



①次の人は介護者の監視のもとでご使用ください。

- マヒなどで身体の自由が利かない人
- 寝たきりの人
- 12才以下の子供
- 認知症の人や意思表示ができない人
- 適用部位に浮腫がある人
- 適用部位に阻血組織がある人
- 自分で操作できない人
- 皮膚知覚が低下している人や部位



②口中・陰部などには、使用しないでください。けがなどの原因となります。



③頸動脈(咽喉部)、頭部(脳、目、耳など)、胸部付近、特に心臓の前後に挟んで使用しないでください。



④正常な判断ができない状態(お酒を飲んだ人、睡眠薬を飲んだ人)で使用しないでください。



⑤本来の目的以外には、絶対使用しないでください。故障や事故の原因となります。また、ペットへは使用しないでください。



⑥粘着パッドは金属製の物(ネックレス、ベルト、時計など)と重なったり、触れたりしないように貼ってください。また、粘着パッドが互いに重ならないように貼ってください。



⑦電極コードには金属を近づけたり、他の電気のコードと触れたりしないようにしてください。感電・発火の原因となったり、他の電気製品に異常を起こす恐れがあります。



⑧車の運転中は危険ですので絶対に使用しないでください。



⑨コードの損傷、断線がないか使用前に確認してください。万が一、不具合が確認された場合は使用しないでください。



⑩使用前にスイッチなどを操作し、本体と付属品が正常かつ安全に作動するか確認してください。



⑪定められた手順で操作してください。操作を誤ると事故や故障の原因となります。



⑫全ての電極コードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。発火やショートなどの原因となります。



⑬高周波を利用した家電製品(テレビ、電子レンジ、ラジカセなど)を使用している場合は、3メートル以上離れてご使用ください。近くで使用すると誤作動の原因となることがあります。

使用上のご注意

- ⑭ 接触性皮膚炎など、皮膚に既往歴のある人は、使用時に肌に異常がないか注意してご使用ください。
- ⑮ 体調の優れないときは使用を控えてください。
- ⑯ 身体に疲労感を強く感じているとき、または筋肉痛が特にひどい場合はしばらく使用を控えてください。
- ⑰ 火気、熱湯、高温状態にある器具を扱う炊事中は危険ですので使用しないでください。
- ⑱ しばらく使用しなかった本器を再使用するときは、使用前に必ず本器が正常かつ安全に作動することを確認してください。

3) 電源・配線について

 **警告** 発火、感電、火傷などの事故や物的損害、故障の原因となります。

- ① 電極コードのプラグにゴミやほこりなどを付着させたまま使用しないでください。発火・ショートの原因となります。
- ② 充電コードは本体・電源供給元へ確実に差し込んでください。また、充電コードが破損したり、差し込みがゆるい場合は使用しないでください。差し込みが不完全な場合、感電、ショート、発火の原因となります。
- ③ 充電コードの金属部分を手で触らないでください。汚れによる接触不良により事故や故障の原因となります。
- ④ 充電コードを電源供給側に接続する際は、向きを確認して真っ直ぐ差し込んでください。通常、上下逆さまに挿入できない構造になっていますが、無理に逆さまに入れようするとプラグ内部が変形し、端子間がショートして発熱や発火の恐れがあります。

4) 充電機について

①本製品の充電機は交換できません。

②充電について

- 充電機は消耗品です。長時間充電してもすぐ充電機の容量がなくなるときは、新しい製品をお買い求めください。本体の使用状況(頻度や時間など)により違いはありますが、およそ約500回の充放電が寿命の目安です。
- 充電機の寿命を保つため、充電機の残量表示が1つになってから充電することをおすすめします。
- 充電機は使わないで放置していても自己放電します。そのため、新しい充電機でもはじめから容量が少なくなっていたり、まったくないことがあります。これは充電機の不良ではありません。
- 充電のしすぎによって故障することはありません。

●充電は周囲温度0°C~40°C以内で行ってください。

●湿気やほこり、水滴、振動の多いところでは充電しないでください。

●充電をする際は、本器が濡れていないか確認してください。また、本器が濡れている状態で充電をしないでください。

●本器が濡れている場合は、十分に拭き取ってから充電をしてください。

●充電をする際は、充電ジャック(USB Type-C)内部に水滴や異物が入っていないか確認してください。水滴や異物が入ったまま充電すると、火災、やけど、けが、感電などの原因になります。

●充電中に本器を布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災などの原因になります。


③充電ジャックについて

●充電ジャック(USB Type-C)に水などの液体を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因になります。

●充電ジャック(USB Type-C)に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、中に入れたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因になります。





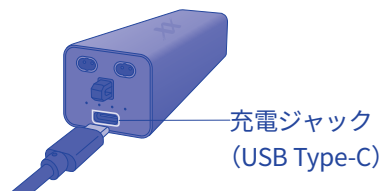





④充電コードの取扱いについて

●プラグ部分が曲がってしまった充電コードは使用しないでください。手で戻しても、プラグ内部が変形してしまい、使用を続けると端子間がショートして発熱や発火などの原因になります。









使用上のご注意

5) 使用中のご注意

-  ①粘着パッドは正しく装着してください。
-  ②機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、電源を切ってください。
-  ③本器を使用した際に、身体に異常を感じたり、発疹・発赤・かゆみなどが現れたときは、直ちに使用を中止してください。異常が継続する場合は、医師に相談してください。
-  ④使用開始当初は、出力は弱めに設定してください。また、刺激感覚は個人差があり、かつ部位によっても感じ方に差があります。急に出力を上げすぎないように、1～2週間かけて身体を慣らしながら出力を上げてください。
-  ⑤刺激に対し、身体が慣れてからも始めから強くしないで少しずつ出力を上げてください。
-  ⑥出力口に金属製の棒やハサミ、ピンなどを差し込まないでください。感電・発火の原因となります。
-  ⑦本体を水につけたり、濡らしたりしないでください。内部に水が入ると発火・ショートなどの事故や故障の原因となります。(本器を使用したままトイレに入らないでください)
-  ⑧お子様や認知症の方が、粘着パッドなどの付属品を口に入れたり、他の用途に使わないよう十分に注意してください。事故や故障の原因となります。
-  ⑨目的にあった時間・量を超えないように注意してください。また、使用する身体の部位、回数などは年齢や体調などにより個人差があります。取扱説明書をよく読み、不明な点はお買い求めの販売店または発売元に相談してください。
-  ⑩本器をポケットやカバンなどに入れると、勝手にスイッチが押される可能性があります。誤作動にご注意ください。

















6) 使用後のご注意

-  ①使用後は電源スイッチを切り、電極コードを出力口から抜いてください。電極コード類の取り外しに際しては、必ずプラグ部を持って引き抜いてください。
-  ②本体、付属品などは、次の使用に支障のないように清潔にし、湿気の少ない所に整理、保管してください。
-  ③電極コードや粘着パッドは、無理に折り曲げたり、丸めたりしないでください。
-  ④使用後、ウェットティッシュなどで粘着パッド装着部の皮膚を清拭してください。
-  ⑤使用後、体調に異常が感じられた場合は、しばらく使用を控えてください。
-  ⑥電極コード類を本体に巻き付けた状態で放置しないでください。
電極コードの接触不良や故障の原因となります。



保守・点検のご注意

1) 保管とお手入れについて 警告

-  ①温度、湿度の高い所、ほこりの多い所での保管はしないでください。劣化を早め、故障・事故の原因となります。
-  ②長期間ご使用にならないときは、必ず充電コードを抜いてください。
-  ③お手入れは、電源スイッチを切ってから行ってください。
-  ④濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。感電などの事故の原因となります。
-  ⑤本体の清掃は、変色の原因となるのでシンナー、ガソリン、灯油などの揮発油や磨き粉、熱湯、薬品類で拭かないでください。水かぬるま湯または中性洗剤を含ませて、固く絞った布で拭いてください。
-  ⑥お子様の手の届かない所に保管してください。落としてけがや破損の原因となります。
-  ⑦本体は絶対に開けないでください。故障の原因になります。
-  ⑧電極コードは消耗品です。使用状態により異なりますが、安全にお使いいただくために遅くとも3年以内には交換してください。長年使用すると、コードの断線などで火傷・火災などの事故の原因となることもあります。
-  ⑨電極コード類に亀裂などの不具合が生じているときは、すぐに使用を中止してください。危険ですので、お買い求めの販売店または発売元までご連絡の上、新しいものをお求めください。
-  ⑩電極コード類を傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟みこんだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電・事故の原因となります。
-  ⑪他の機器の部品や付属品などを流用しないでください。規格や仕様が異なるため、事故や故障の原因となります。
-  ⑫本体及び付属品は、使用に際し正しく作動することを、日常的に点検してください。
-  ⑬粘着パッドの袋には使用期限が表示してあります。使用期限内に使い切るようにしてください。また、使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
※使用期限は粘着パッドの裏面左下のシールに表記されています。
例)  JAN 20XX → 使用期限は20XX年の1月
-  ⑭粘着パッドは消耗品です。粘着力が低下(1日3回、約1週間程度の使用が標準)しましたら交換してください。
-  ⑮粘着パッドを貼った部分が赤くなったり、かゆみを引き起こした場合は、使用を中止して、お買い求めの販売店または発売元へお問い合わせください。

保守・点検のご注意

- ⑩ 粘着パッドの使用後は、元の透明フィルムに戻し、袋に入れてチャックを閉め、高温・高湿を避けて保管してください。
- ⑪ 〈粘着パッドの模倣品に対するご注意〉
安全に製品をご使用いただくために、製造元で品質管理を実施しております純正の粘着パッドをご使用ください。模倣品の使用が原因で発生した火傷事故・故障・その他の不具合などにつきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

2) 故障時及び取扱いに際しての注意事項

警告

- ① 本体や付属品を勝手に修理したり、改造しないでください。故障かなと思ったら使用を中止し、お買い求めの販売店または発売元へお問い合わせください。
- ② 本体を高い所から落としたり、強い衝撃を与えないでください。誤って落とした場合は必ず点検を受けてください。そのときに異常がなくても内部の損傷が進み、後に事故や故障の原因になることがあります。

3) その他

警告

- ① 機器及び付属品を廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、地域で定められている規則に従って処分してください。




本器には、リサイクル可能なリチウムイオン充電池が内蔵されています。

注意

- ① 3年以上使用した付属品(電極コード)による事故については、当社は責任を負いかねる場合もありますので、予めご理解をお願いします。

本体と付属品・仕様

本体・標準付属品

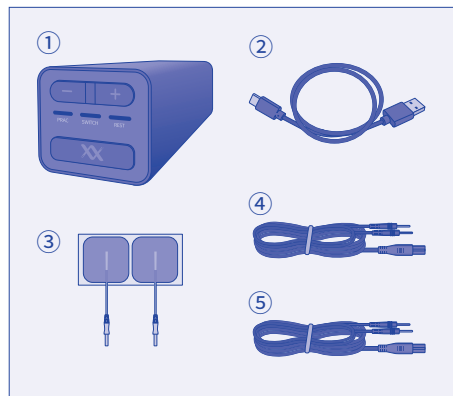

- ①本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
- ②充電コード (USB Type-C) ・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- ③RUCOE 粘着パッド<48×48mm・2枚> ・・・・4パック
- ④RUCOE 電極コード
(φ1.5pin)青・1.3m ・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- ⑤RUCOE 電極コード
(φ1.5pin)薄灰・1.3m ・・・・・・・・・・・・・・・・1本

*取扱説明書(本誌)

* Quick Start Guide

仕 様

定格電圧・・・・・・・・ DC5V

定格電流・・・・・・・・ 410mA + 20%

本体サイズ・・・・・・・・ 縦100×横35×厚さ31 (mm)

重量・・・・・・・・ 約100g

出力電流・・・・・・・・ 最大50mA (ピーク電流値、負荷1000Ω時)



出力レベル・・・・・・・・ 1～49レベル

タイマー・・・・・・・・ プラクティスモード、レストモード：20分(固定)

スイッチモード・・・・・・・・ 3分(固定)

防水性能・・・・・・・・ IPX4

各部名称

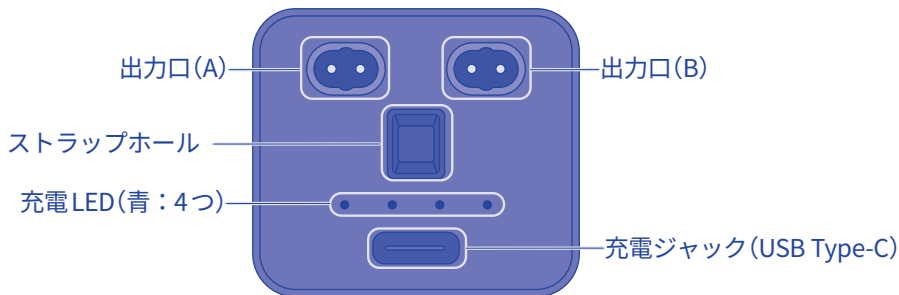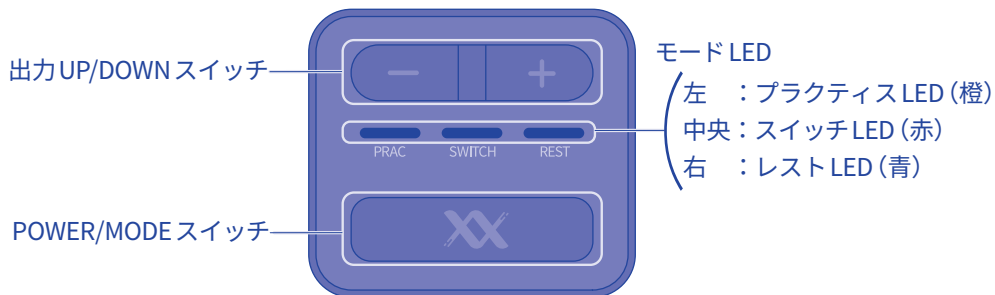


ご使用の前に

本体を充電する

ご使用になる前に、本器を充電してください。

- 1 付属の充電コードを本器の充電ジャック(USB Type-C)と、給電可能なUSBポート(USB Type-A)に接続します。

※充電コードは、まず給電可能なUSBポート(USB Type-A)に接続してから、本器の充電ジャック(USB Type-C)に接続してください。

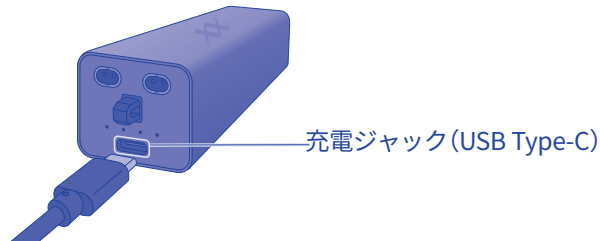

- 2 充電が開始されると、充電LEDが左から1つずつ点滅します。充電が完了すると、充電LEDが消灯します。



※充電中に使用することはできません。また、充電が開始されると出力が停止します。

※充電時間は、最大で約4時間です。

※本器の充電電池は、取り出したり交換したりできません。


ご使用の前に

粘着パッドのセットと貼り付け

お使いになる前に、肌に粘着パッドが合うかテストをしましょう。


- ①おなか・腕・太ももの内側など皮膚のやわらかい部分へ粘着パッドを貼ってください。
(粘着パッドに電極コードは接続しないでください)
- ②20分後、粘着パッドを剥がしてください。粘着パッドを貼っていた部分が赤くなったり、かゆみを引き起こした場合は、使用を中止してお買い求めの販売店または発売元へお問い合わせください。
- ③皮膚に異常がないことをご確認の上、ご使用ください。

1 粘着パッドに、電極コードの細い先端を差し込んでつなぎます。

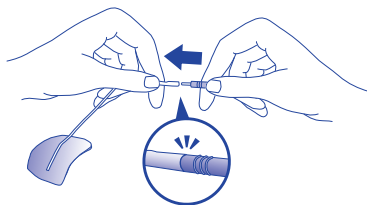

※必ず金属部分が見えなくなるよう
根元まで差し込んでください。

2 出力口(A)、出力口(B)に、それぞれ電極コードを差し込みます。

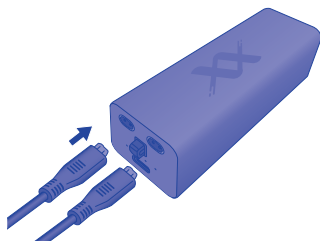

※電極コードは青と薄灰の2色ありますが、出力口(A)、(B)のどちらに接続してもかまいません。

※片方の出力口のみでの接続でも使用可能です。

※片方のみ使用する場合は、もう片方の(使用しない側の)電極コードを外した上で使用してください。


※電極コードは奥までしっかりと差し込んでください。

3 貼り付ける部分の汗を、タオルなどで拭き取ります。

※汗などで肌が汚れていると、粘着パッドが貼り付きにくくなります。

4 粘着パッドを透明フィルムから剥がし、粘着面を肌に密着させて貼り付けます。

※粘着パッドを透明フィルムや皮膚から剥がすときは、パッドの端を摘んでゆっくりと持ち上げてください。電極コード部を持って剥がすようなことはしないでください。

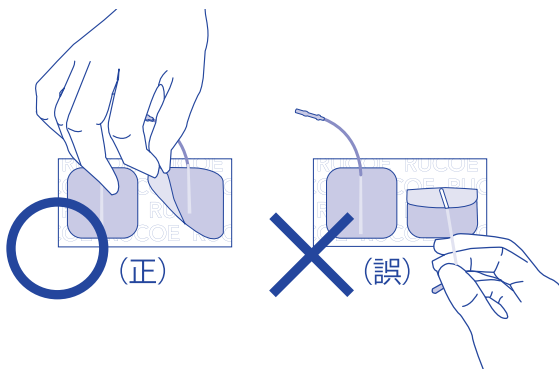

粘着パッド貼り付け位置の目安は、以下のWebサイトにてご確認ください。


<http://rucoe.net/golf/>



ご使用の前に

粘着パッドの保管について

- 粘着パッドを保管する際には、透明フィルムの「RUCOE」と読める面に貼ってください。逆の面に貼ると剥がれにくく、粘着パッドの寿命を縮めます。
- 粘着パッドの使用後は、元の透明フィルムに戻し、袋に入れてチャックを閉め、高温・高湿を避けて保管してください。
- 粘着パッドの袋に使用期限が表示してあります。期限切れの粘着パッドは使用しないでください。(P.11)
- 粘着パッドは消耗品です。粘着力が低下(1日3回、約1週間程度の使用が標準)しましたら交換してください。(P.25)

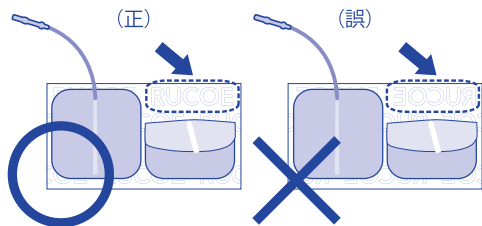

警告 粘着パッドについて


- 湿布や絆創膏などの粘着物によりかぶれやすい方は注意してご使用ください。かぶれたり、赤くなったりすることがあります。
- 傷のある皮膚には使用しないでください。
- 粘着パッドを使用した際に、発疹・発赤・かゆみなどが現れたときは直ちに使用を中止し、お求めの販売店または発売元にご相談ください。
- 粘着パッドを使用する際には、金属物(ネックレス、ベルト、時計など)と重なったり、触れたりしないよう注意して貼ってください。
- 粘着パッドは互いに重ならないように貼ってください。また、使用中に粘着パッド同士が接することがないように貼ってください。粘着パッド同士が接すると、接した部分に電流が集中して流れ、場合によっては火傷などの皮膚障害を起こす恐れがあります。
- 粘着パッドを貼り付ける際には、必ず皮膚に密着させてください。貼った部分に隙間があると刺激が強くなり痛みを感じ、場合によっては火傷などの皮膚障害を起こす恐れがあります。
- 皮膚にローション、オイルなど化粧品が残っている場合、または汗や皮脂で皮膚が汚れている場合は、皮膚を石鹸でよく洗い完全に乾かしてから貼り付けてください。粘着パッドの粘着力が低下し、場合によっては火傷などの皮膚障害を起こす恐れがあります。
- 粘着パッドを皮膚から剥がす際は、必ず本体の電源スイッチを切ってください。
- 使用期限の切れたものや粘着力が低下した粘着パッドをそのまま使用したり、テープ・バンド・下着などで固定して使用しても、適切な効果が得られないばかりでなく、急激に強い刺激がかかったり、場合によっては火傷などの皮膚障害を起こす恐れがありますのでおやめください。

RUCOE GOLFの使い方


粘着パッドをセットしてから、操作を行ってください。（P.16～18）

1 電源を入れる

POWER/MODEスイッチを2秒以上長押しして、電源を入れます。

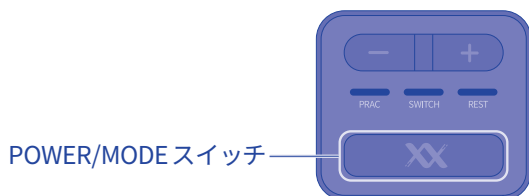

電源が入るとスタンバイ状態になり、プラクティスLED（橙）が点滅します。
また、充電LEDが電池残量に応じて点灯します。

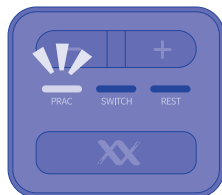


■充電LEDによる電池残量表示

- 4点灯(○○○○) 100～75%
- 3点灯(○○○●) 75～55%
- 2点灯(○○●●) 55～35%
- 1点灯(○●●●) 35～ 0%
- 左点滅(○●●●) 使用不可(要充電)
- 右点滅(●●●○) 使用不可(電池エラー)

RUCOE GOLFの使い方

2 モードを選択する

POWER/MODEスイッチを押して、使用するモードを選択します。

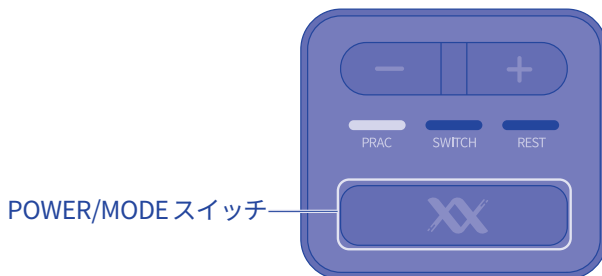

POWER/MODEスイッチを押すごとに、以下の順番でモードLEDが点滅します。

プラクティスLED(橙) → スイッチLED(赤) → レストLED(青)

↑

各モードについて

- PRAC (プラクティスモード) …………… 練習効率をよくする
- SWITCH (スイッチモード) …………… 飛距離を出す
- REST (レストモード) …………… 筋肉のリフレッシュ、休息


※詳しい使用方法は、RUCOE Web サイト(P.17)にてご確認ください。

3 出力を開始する

出力UPスイッチを押すと、出力が開始されます。

出力が開始されると、モードLEDは点滅から点灯に変わります。

※タイマー時間は変更できません。プラクティスモード、レストモードは20分、スイッチモードは3分でそれぞれ固定となります。

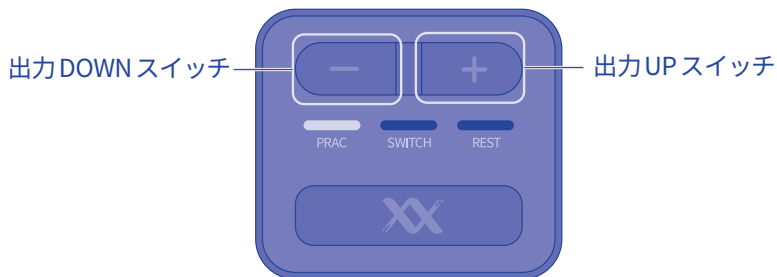

- **出力UPスイッチ**または**出力DOWNスイッチ**を押して、適度な出力に調節してください。1回押すごとに選択中のモードのLEDが1回点滅すると共に、出力レベルが1上がり(下がり)ます。
- 最大出力は49レベル(50mA)となります。
- **出力UPスイッチ**または**出力DOWNスイッチ**は、長押しすることで出力を連続して調節できます。長押し中は選択中のモードのLEDが高速で点滅します。
- 出力が最大になった状態で**出力UPスイッチ**を押すと、選択中のモードのLEDが点灯します。

※本器をポケットやカバンなどに入れると、勝手にスイッチが押される可能性があります。誤作動にご注意ください。


RUCOE GOLFの使い方

4 終了する

出力開始から20分(スイッチモードは3分)が経過すると、自動的に出力が停止します。

出力が停止すると、モードLEDは点灯から点滅に変わります。

出力停止中に**POWER/MODEスイッチ**を2秒以上長押しして電源を切ります。

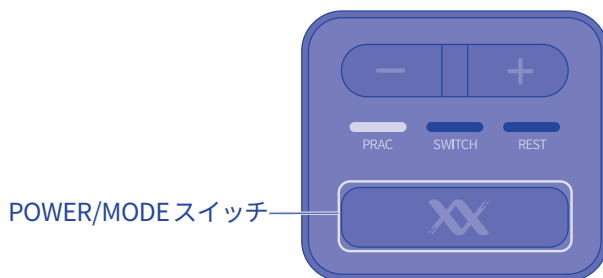

※出力を手動で停止したい場合は、**POWER/MODEスイッチ**を1回押してください。

出力が停止するとともにスタンバイ状態になります。

再び出力を開始する際は、手順**2**～**3**(P.20～21)の操作を行ってください。

※出力中に電源を切りたい場合は、**POWER/MODEスイッチ**を2秒以上長押ししてください。

※出力されていない状態で3分以上操作を行わないと、自動的に電源がOFFになります。

ご使用後は電極コードを外し、粘着パッドを身体から外して透明フィルムに貼って保管してください。


故障かな？と思ったら

Q1：エラー表示について

A：粘着パッドが身体から剥がれたり、電極コードの接続が不十分な場合、モードLED（3つ）が同時に点滅し、出力が「0」に戻ります。下記の①・②を確認の上、**POWER/MODEスイッチ**を押してエラーを解除してください。

- ①粘着パッドの粘着力が弱くなっていませんか？粘着力が弱くなると、皮膚から外れてエラーになります。新しい粘着パッドに交換してください。まだ粘着力がある場合は皮膚に密着するように貼り直してください。
- ②電極コードは本体と粘着パッドにしっかりと接続されていますか？
接続が不十分だとエラーになります。しっかりと奥まで差し込んでください。
- ①・②を確認してもエラーになる場合は傷や変形、内部の断線など電極コードの故障の可能性があります。お求めの販売店または発売元にご連絡ください。

Q2：充電ができないときは？

A1：電源を入れたときの充電LEDをご確認ください(P.19)。表示が右点滅(●●●)の場合、充電電池の寿命または充電電池が故障している可能性があります。お求めの販売店または発売元にご連絡ください。

A2：本体・電源供給元に充電コードがしっかり根元まで接続されているかご確認ください。また、充電コードの金属部分が汚れていないことを確認してください。汚れている際にはティッシュペーパーなどで拭き取ってください。それでも改善されない場合は、充電コードに断線などがないか、確認してください。断線の可能性がある場合、別の充電コードをお試しください。
※確認後も変化がない場合は故障の可能性があります。お求めの販売店または発売元にご連絡ください。

Q3：出力を開始しても体感がない

A：体感には個人差がありますが、**出力UPスイッチ**を10回程度押して出力を上げてても体感がない場合は故障の可能性があります。お求めの販売店または発売元にご連絡ください。

困ったときはここをチェック！

Q1：充電時間はどのくらいかかりますか？

A：充電時間は最大で約4時間です。充電電池の寿命を保つため、充電電池の残量表示が1つになってから充電することをおすすめします。

Q2：満充電でどれくらいの時間使用できますか？

A：満充電の場合、約5時間使用できます。（周囲の気温や充電電池の状態、使用する出力レベルにより変動します）

Q3：粘着パッドが剥がれてしまったときは？

A：粘着パッドは、乾燥してくると粘着力が低下します。通常の使用で1週間くらい(1日3回の使用)で交換することをおすすめします。

※粘着パッドの追加注文は、Webサイトよりお求めください。(P.25)

Q4：機器の廃棄はどのように行えばよいですか？

A：本器にはリチウムイオン電池が内蔵されております。地域で定められている規則に従って処分してください。

消耗品の交換・ご注文について

安全に製品をご使用いただくために、以下の消耗品について定期的に点検・交換してください。
RUCOE GOLFの消耗品と交換時期の目安は以下のとおりです。

品名	交換時期の目安
RUCOE 粘着パッド (48 × 48mm ・ 2枚)	<ul style="list-style-type: none">・ 使用期限が切れた際 (P.11)・ 粘着力が低下 (1日3回、約1週間程度の使用が標準) した際
RUCOE 電極コード (φ1.5pin) 青 ・ 1.3m RUCOE 電極コード (φ1.5pin) 薄灰 ・ 1.3m	<ul style="list-style-type: none">・ 3年以内
充電コード (USB Type-C)	<ul style="list-style-type: none">・ 断線などの接続不良により充電ができない場合

消耗品のご注文は、以下のWebサイトよりお申し込みください。

<https://ito-ec.jp/>



保証書

本証は、お買い上げいただいた製品が、
厳密な検査基準に合格したものであることを証明します。
また、保証規定の内容にて保証いたしますので、
よくお読みの上、保管してください。

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入年月日より1カ年間、無料で修理いたします。
- 修理の際は、必ず本証をご提示ください。
- 本証は日本国内においてのみ有効です。また再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 取扱説明書に記載のない使用・誤用・乱用による故障。
 - 火災・地震・水害・その他天災及び盗難等の災害による故障。
 - 弊社以外での修理や改造による故障。
 - 雷・規格外電圧での使用などの外部異常電圧による故障。
 - 付属品の交換
 - 本証の提示がない場合また必要事項の記入がない場合。
 - 使用中に生じたキズなどの外観の変化。
- 本製品の補修用性能部品の保有年数は、製造打切後7年です。
- 「転居」などで、ご購入販売店での修理が受けられない場合は、発売元へご連絡ください。
- 販売店印、購入年月日の記載がない場合は領収書をご提示ください。(通信販売にてお買い上げのお客様は、お届け伝票をご提示ください。)

品名 (型式)	RUCOE GOLF
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	ご購入日から1年間

お客様名	フリガナ
電話番号	()
ご住所	〒 府県

販売店名	
電話番号	()
住所	(〒 -) 都道府県

発売元

 伊藤超短波株式会社

見本

発売元

 **伊藤超短波株式会社**

埼玉県川口市栄町3-1-8 ☎048 (254) 1011 (代表)

<http://www.itolator.co.jp/>

E0a231382-2106 A2106DL